


자동심장충격기 사용법


잠깐! 먼저 119에 신고하세요.

① 전원버튼을 누르면 전원이 켜집니다.

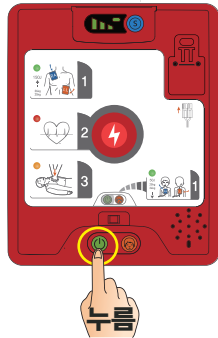



성인용 모드 (25kg 이상)

가방 덮개를 열고 녹색 버튼을
2초 동안 누릅니다.(전원 ON)

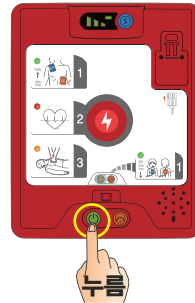

소아용 모드 (25kg 미만)


녹색 버튼을 2초 동안 눌러 전원을 켜 후
왼쪽으로 슬라이드를 밀어 옮기고
노란색 버튼을 2초 동안 누릅니다.

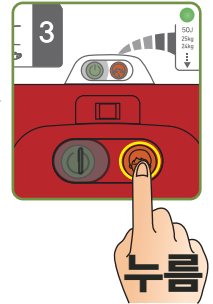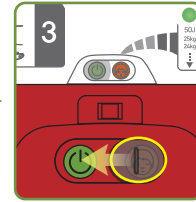


♦ 전원을 끌 때는 전원이 켜진 상태에서 녹색 버튼을 2초 동안 누릅니다.

② 음성안내에 따르세요.

1 패드부착하기(※패드 부착 위치에 물 또는 이물질이 묻어있는 경우 이물질을 제거해줍니다.)

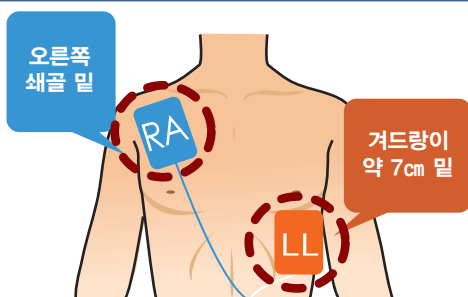

[성인의 경우]

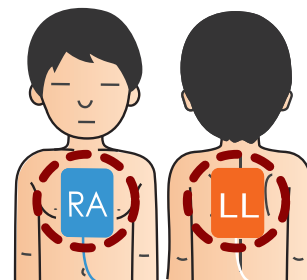


[소아의 경우]

2 환자와 접촉금지



3 전기충격버튼 누르기

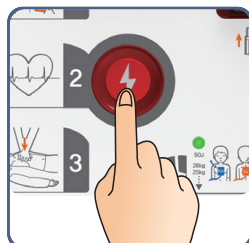

4 흉부압박(분당 100~120회)



5 압박위치

